

Choisissez la taille adéquate de la sangle

Le tableau ci-dessous établit des directives afin de choisir la taille la plus convenable.

Important

Des exceptions peuvent toujours se présenter, dépendant de la constitution de l'utilisateur.

taille de l'utilisateur (cm)	Tailles sangle Standard				
	XS	S	M	L	XL
110	jusqu'à 28 kg	28 - 36 kg	36- 48 kg	-	-
120	jusqu'à 33 kg	33 - 43 kg	43 - 58 kg	-	-
130	jusqu'à 36 kg	23 - 50 kg	50 - 68 kg	-	-
140	-	jusqu'à 50 kg	50 -78 kg	-	-
150	-	jusqu'à 34 kg	34 - 90 kg	-	-
160	-	jusqu'à 40 kg	44 - 84 kg	84 - 102 kg	-
170	-	jusqu'à 40 kg	44 - 98 kg	98 - 114 kg	plus que 114 kg
180	-	-	48 - 100 kg	100 - 114 kg	plus que 114 kg
190	-	-	54 - 90 kg	90 - 114 kg	plus que 114 kg
200	-	-	60 - 90 kg	90 - 112 kg	plus que 112 kg

taille de l'utilisateur (cm)	Tailles sangle de Toilette				
	XS	S	M	L	XL
110	jusqu'à 30 kg	30 - 36 kg kg	36 – 48 kg kg	-	-
120	jusqu'à 36 kg	36 - 43 kg	43 - 57 kg	-	-
130	jusqu'à 38 kg	38 -50 kg	50 - 78 kg	-	-
140	jusqu'à 41 kg	30 - 58 kg	58 - 78 kg	-	-
150	jusqu'à 40 kg	40 - 60 kg	60 - 90 kg	-	-
160	jusqu'à 42 kg	42 - 66 kg	66 - 102 kg	-	-
170	-	jusqu'à 76 kg	76 - 110 kg	110 - 120 kg	plus que 120 kg
180	-	jusqu'à 78	76 - 108 kg	108 - 120 kg	plus que 120 kg
190	-	-	60 - 106 kg	106 - 120 kg	plus que 120 kg
200	-	-	60 - 100 kg	100 -120 kg	plus que 120 kg

Résultats d'une étude réalisée au sein de trois institutions pour personnes handicapées et d'une maison de repos parmi un groupe de 110 sujets composé à la fois d'enfants et d'adultes atteints de lésions congénitales ou acquises, qui doivent être soulevés en position assise à l'aide de la bride la plus courte au niveau des épaules et de la bride la plus longue au niveau des jambes. Les sujets possédaient un IMC compris entre 15 et 40 (IMC = poids/taille²).

Quelle taille choisir ?

Repérez dans la colonne de gauche la taille de l'utilisateur. Sur la rangée de la taille, repérez le poids de l'utilisateur. La colonne correspondante montre quelles tailles conviennent pour cet utilisateur. Selon la corpulence, des tailles différentes doivent être utilisées pour des personnes de la même taille et du même poids.

Exemple

Une personne de 160 cm pesant de 40 à 94 kg choisira de préférence une taille M(edium).